

Pedalo® Pyramido®

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Produkt haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Gebrauchsanleitung zunächst vollständig durchlesen. Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Das Pyramido® ist ein vielseitig einsetzbarer Holzklappständer. Er dient zur Befestigung von Hängematten beim Einsatz in der Therapie (Stimulation des Vestibulärorgans) oder bei Spiel und Freizeit. Die Pyramidenform, sowie die Querverspannung der Füße verleiht dem Pyramido® außerordentliche Stabilität. Durch zusätzliches Anbringen von Querleisten eignet sich das Pyramido® auch als ausgezeichnetes Klettergestell oder als Zeltgestell. Die Fußplatten sind mit Gummi belegt und somit rutschsicher.

Das Pyramido® ist schnell und problemlos an jedem Ort aufstellbar und platzsparend zusammenklappbar. Es kann in der Höhe sowie in der Breite nach Ihren Vorstellungen variiert werden. Ideal für den Einsatz in Ergotherapie, Krankengymnastik, Psychomotorik, Logopädie, Sensorische Integration, Kindergarten, Sonderkindergarten, Vorschule, Sonderschule, zu Hause, im Garten, während der Schwangerschaft und nach der Geburt.

Ausführung: Buche Schichtholz, mit Leinöl behandelt, höhenverstellbar bis 240 cm, Standfläche bis ca. 235x235 cm. Inklusive Aufhängeset. Ohne Therapie-Hängematte und Einlegeboden.

SPORT-THIEME®

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Achtung!

Für die Benutzung des Gerätes wird ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung benutzen. Gegebenenfalls ist entsprechende Schutzausrüstung zu tragen. Das **Pyramido® kann maximal mit 120 kg belastet werden**. Auch wenn es sich unter anderem um ein Spielgerät für Kinder handelt, sollte der Zusammenbau immer von einem Erwachsenen durchgeführt oder beaufsichtigt werden. Achten Sie beim Verwenden des Inbusschlüssels darauf, dass Sie ihn gerade und tief in den Schraubenkopf einsetzen. Andernfalls kann der Schraubenkopf beschädigt werden. Ziehen Sie die Schrauben fest an. Die Schraubenköpfe sollten sich etwas in das Holz eindrücken. **Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen**. Gerät vor Nässe schützen. Geölte oder lackierte Holzteile können feucht abgewischt werden. Bei stärkerer Verschmutzung können geölte Holzteile mit Stahlwolle oder feinem Schleifpapier überarbeitet werden. Anschließend wieder mit Naturöl oder Wachs dünn einlassen.

Montage

Schritt 1: Montage der 4 Verlängerungsfüße mittels der beigelegten 8 Flachrundkopfschrauben M6x6 cm, 8 Hutmutter M6, 16 Unterlegscheiben: Die Fußleisten werden von außen, Breitseite auf Breitseite mit den vormontierten Klappständerleisten, mit je 2 Schrauben M 6 x 6 cm verschraubt. Die Füße überlappen sich 13 Bohrlöcher. Je Fuß eine Schraube in das 1. und 13. Loch. Unter den Schraubenkopf und unter die Hutmutter wird je eine Unterlegscheibe gelegt. Alle Schrauben fest anziehen.



Schritt 2: Der Sicherheitshaken wird wie abgebildet an dem Holzrad fest angeschraubt. Folgende Reihenfolge ist zu beachten: Mutter maximal auf den Sicherheitshaken eindrehen → Holzkugel lose aufstecken → Mutter von Hand bis zur Holzkugel eindrehen → Unterlegscheibe, Holzrad, Unterlegscheibe, Mutter → Mutter mit Sicherungsring. Beachten Sie, dass die Muttern zwischen dem Sicherheitshaken und dem Holzrad fest angezogen sind. Die beiden Muttern oberhalb der Holzscheibe müssen gekontert werden. Dazu ist es notwendig die eine Mutter mit einem Gabelschlüssel festzuhalten und die zweite mit einem zweiten Schlüssel fest gegen die erste Mutter zu drehen. So gekontert können sich die Muttern nicht von selbst lösen!! Die Holzkugel muss nicht festgeklemmt werden. Sie dient lediglich als Abstandshalter im Pyramido®-Gestell.

Nun wird der Sicherheitshaken mit Holzscheibe von oben zwischen den Scharnieren, mit dem Haken nach unten, in das Pyramido®-Gestell eingeführt.

Schritt 3: Jetzt kann das Pyramido®-Gestell aufgestellt und aufgeklappt werden. Am besten mit 2 Personen. Die Raumhöhe sollte mindestens 2,8 m betragen.

Schritt 4: Füße werden in die Gummikappen der Fußplatten gesteckt. Vorher die Fußplatten diagonal mit den Gurtbändern verbinden (Montage der Gurtbänder an den Fußplatten siehe Foto). Die Gurtbänder werden später so in der Länge eingestellt, dass sie beide unter leichtem Zug stehen.

Schritt 5: Montage der Stabilisierungsquerleisten. Lösen Sie die Flügelmuttern der Querleisten und drehen Sie die Querleisten in die Waagerechte. Verschrauben Sie die Querleisten an den markierten Löchern der Pyramido®-Füße mit je einer Schraube und Flügelmutter.

Zur Platz sparenden Aufbewahrung lösen Sie nur die 4 Flügelmuttern der Querleisten und drehen diese zur Seite. Nun können Sie das Pyramido®-Gestell zusammenklappen.

Wichtig

Alle Teile regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen überprüfen. Die Sicherheitshakenverschraubung und das Aufhängesystem vor jedem Einsatz kurz kontrollieren. Verschlissene oder beschädigte Teile sofort austauschen! Beim Aufstellen des Pyramido® auf ausreichend Abstand zu Wänden oder anderen Gegenständen achten. Das Pyramido® nicht als Schaukelgestell verwenden. Das Pyramido® nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.

Zubehör

- Therapie Hängematte 200x140 cm aus Bio-Baumwolle (Art.-Nr. 11 174 7821)
- Therapie Einlegeboden 60x60 cm gepolstert mit festem Schaumstoff Höhe 6 cm und Skaibezug (Art.-Nr. 11 174 0123)



Schritt 1:
Montage der Füße



Schritt 2:
Montage Holzscheibe mit Haken



Schritt 3+5:
Aufstellen und Montage der Stabilisierungsleisten



Schritt 4:
Montage der Fußplatten mit den Gurtbändern