



Lojer Winkeltisch Bedienungsanleitung

280208

Inhalt

1	Lojer Winkeltisch.....	1
2	Übernahmeinspektion.....	1
3	Zusammenbau und Inbetriebnahme.....	1
3.1	Inhalt der Verpackung.....	1
3.2	Zusammenbau des Winkeltisches.....	1
4	Gebrauch des Winkeltisches.....	4
4.1	Winkelverstellung der Liegefläche.....	4
4.2	Winkelverstellung des Fußteiles.....	4
4.3	Stufenlose Verstellung der Stützrolle.....	5
5	Wartung.....	5
5.1	Reinigung.....	5
5.2	Service.....	5
5.2.1	Halbjahreswartung.....	5
6	Maße:.....	5
6.1	Angewandte Normen.....	6
7	Ersatzteile:.....	6
8	Lojer Garantie.....	7
8.1	Internationale Garantiebestimmungen.....	7
8.2	Vorgehen im Garantiefall.....	8
9	Kontaktinformation.....	8



1 Lojer Winkeltisch

Der Lojer Winkeltisch ist konzipiert für medizinische Anwendungen und Training. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor dem Gebrauch.



Achtung ! Folgen Sie den Anweisungen mit dem Ausrufezeichen um Beschädigungen zu vermeiden..

2 Übernahmeinspektion

Bevor Sie den Winkeltisch in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich davon das die Verpackung unbeschädigt ist und keinerlei Transportschäden ersichtlich sind.

Melden Sie eventuell aufgetretene Transportschäden dem Transporteur sowie Ihrem Lieferanten spätestens 2 Tage nach Erhalt der Ware.

Überprüfen Sie Anhand des Lieferscheines ob alle hierauf aufgeführten Artikel vorhanden sind. Fehlmengen bitte sofort dem Lieferanten melden.

3 Zusammenbau und Inbetriebnahme

Dieses Produkt ist für den Gebrauch in normalen, trockenen Innenräumen ausgelegt..

Vergewissern Sie sich davon, daß das gesamte Verpackungsmaterial entfernt wurde, bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen.



ACHTUNG ! Verändern Sie nicht die Konstruktion des Winkeltisches und installieren Sie auch keine Teile welche nicht in dieser Bedienungsanleitung genannt warden und zu dem Tisch geliefert wurden.

3.1 Inhalt der Verpackung


Teile des Lojer Winkeltisches::


- Fuß mit Einstellstützen
- Säule
- Liegefläche
- Stützrolle

3.2 Zusammenbau des Winkeltisches


Folgende Werkzeuge warden für den Zusammenbau benötigt::

- 19 mm Schraubenschlüssel, oder verstellbarer Schraubenschlüssel, 2 Stück
- 13 mm Schraubenschlüssel oder verstellbarer Schraubenschlüssel 1 Stück
- 5 mm Inbusschlüssel

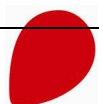

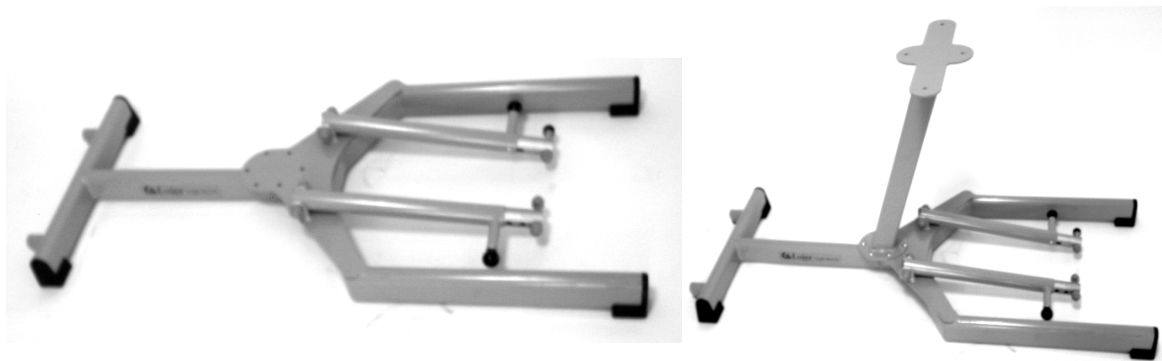

1. Säule auf dem Fuß montieren mit sechs 5mm Inbusschrauben.
Achten

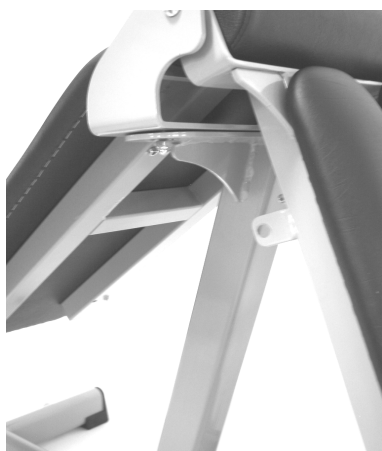

Sie auf die Säulenneigung



2. Montieren Sie die Liegefläche auf der Säule mit vier 13mm Schrauben.



3. Montieren Sie die Einstellstütze unter der Liegefläche mit einer 19mm Schraube und Mutter. Decken Sie Schraube und Mutter mit den Plastikkappen ab.



4. Montieren Sie die Einstellstütze unter dem Fußteil mit einer 19 mm Schraube und Mutter. Decken Sie die Schraube und Mutter mit Plastikkappen ab.



5. Montieren Sie die Stützrolle in der seitlichen Halterung am Fußteil und fixieren diese mit dem Patentknebel..



6. Nach dem Zusammenbau überprüfen Sie bitte den festen Sitz aller Schrauben, Muttern und Verriegelungen und ob alle Verstellmöglichkeiten sauber arbeiten.

4 Gebrauch des Winkeltisches

Der Lojer Winkeltisch hat folgende Funktionen:

4.1 Winkelverstellung der Liegefläche

Die Winkelverstellung der Liegefläche geschieht wie folgt:

- Fassen Sie die Liegefläche und ziehen Sie gleichzeitig den Rastbolzen aus der Verstellstütze, die Liegefläche kann nun frei bewegt werden.
- Die Liegefläche hat einen Verstellbereich von -90 bis $+35$ Grad (Gemessen von Horizontalstellung). Lassen Sie den Rastbolzen bei der gewünschten Stellung einrasten.



WARNUNG ! Überschreiten Sie nicht die angegebenen Winkel !



4.2 Winkelverstellung des Fußteiles

Die Winkelverstellung des Fußteiles geschieht wie folgt:

- Fassen Sie das Fußteil und ziehen Sie gleichzeitig den Rastbolzen aus der Verstellstütze, das Fußteil kann nun frei bewegt werden.
- Das Fußteil hat einen Verstellbereich von -36 bis $+24$ Grad (Gemessen von Horizontalstellung). Lassen Sie den Rastbolzen bei der gewünschten Stellung einrasten.



WARNUNG ! Überschreiten Sie nicht die angegebenen Winkel !

4.3 Stufenlose Verstellung der Stützrolle.

Die Verstellung der Stützrolle erfolgt wie aufgeführt:

- Greifen Sie sich die Rolle und drehen Sie den Patentknebel entgegen dem Uhrzeigersinn zum lösen.
- Bringen Sie die Rolle in die gewünschte Stellung und drehen Sie den Knebel im Uhrzeigersinn fest.



5 Wartung

5.1 Reinigung

Die Polster des Winkeltisches können mit einem milden Seifenmittel gereinigt werden. Hierzu eignet sich zum Beispiel ein einfaches Spülmittel.

5.2 Service

5.2.1 Halbjahreswartung

Überprüfen Sie die beweglichen Teile und ersetzen Sie beschädigte oder abgenutzte Teile..

6 Maße:

Gewicht:	32 kg
Breite:	48 cm
Länge:	154 cm
Höhe:	80 cm

6.1 Angewandte Normen

Folgende Normen wurden bei der Konzipierung und den Tests des Winkeltisches angewandt:

- SFS-EN 292-2
- SFS-EN 349

7 Ersatzteile:

PART	CODE	NAME	QTY
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

8 Lojer Garantie

Vielen Dank für den Kauf eines Lojer Qualitätsproduktes. Unsere Produkte wurden entwickelt um höchsten Ansprüchen in Qualität und Bedienungskomfort zu genügen. Zur Absicherung unserer Lieferqualität räumen wir dem Endkunden folgende Garantie ein:

Die Lojer Produktgarantie bezieht sich auf einen Zeitraum von 24 Monaten nach Kaufdatum und deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Im Garantiefall sollten Sie das Gerät Ihrem Händler zurücksenden, damit dieser die notwendigen Reparaturen vornehmen kann. Sollte dieser nicht verfügbar sein, so finden Sie Ihren nächstgelegenen Ansprechpartner unter www.lojer.com. Oder kontaktieren Sie direkt unsere Serviceabteilung in Finnland (email: service@lojer.com).

8.1 Internationale Garantiebestimmungen

1. Die Garantie ist nur gültig, wenn zum Zeitpunkt des Garantiefalles die Original Einkaufsrechnung oder Kassenquittung vorliegt, sowie die Seriennummer auf dem Gerät leserlich ist.

2. Lojer's Obliegenheiten beschränken sich auf die Reparatur oder je nach Ermessen von Lojer der Austausch des defekten Teiles / Gerätes. In jedem Fall gehört der Versand sowie die Transportversicherung zu den Obliegenheiten des Kunden. Alle hierfür anfallenden Kosten trägt der Kunde. Lojer übernimmt alle Kosten für Material / Ersatzteile sowie die Lohnkosten sowie die Verpackung für die Rücksendung.

3. Im Falle von Garantiereparaturen müssen diese durch offizielle Lojer Händler durchgeführt werden. Kosten die bei nicht autorisierten Händlern anfallen werden nicht übernommen, genauso wenig wie Kosten die durch misslungene Reparaturversuche entstehen.

4. Es liegt kein Fehler des Produktes vor, wenn das Gerät zur Erfüllung regionaler Vorschriften oder Sicherheitsbestimmungen umgebaut werden muß, egal in welchem Land, außer in dem Land für welches das Produkt entworfen und gebaut wurde.

5. Die Garantie deckt folgendes nicht ab:

a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung, Reparatur oder den Tausch von Teilen Aufgrund normalen Verschleißes / Abnutzung (Insbesondere Polster, Seile und Akkumulatoren)

b) Kosten die entstehen durch Transport, die Demontage oder den Aufbau des Produktes.

c) Fehlbedienungen, falscher Gebrauch oder fehlerhafte Installation / Aufbau.

d) Beschädigungen durch Blitzschlag, Hochwasser, Feuer, höhere Gewalt, Naturkatastrophen, Krieg, innere Unruhen, Überspannung, Meteoriten-/Satteliteneinschläge, Vulkanausbrüche, Erdbeben, Wirbelstürme, Flugzeugabstürze, terroristische Anschläge, einstürzende U-Bahn Baustellen, Bergsenkung, Dammbürche, Parasiten und Schädlinge, Verfügungen der hohen Hand, sowie alle anderen Gründe die Lojer nicht zu vertreten hat, sind von der Garantie ausgeschlossen.

e) Das Verschütten von Chemicalien oder gefährlicher Flüssigkeiten welche das Lojer Produkt schädigen können, sowie Substanzen die nicht zum Betrieb des Gerätes notwendig sind aber negative Auswirkungen auf dieses haben..

f) Bagatellschäden, welche die Funktion, die Haltbarkeit, Zuverlässigkeit sowie den optischen Gesamteindruck nicht stören/mindern.

8.2 Vorgehen im Garantiefall

Die folgenden Informationen dienen als Erklärung der Vorgehensweise, wie Sie einen Garantiefall erklären können. Zunächst kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Lojer Händler. Die Mitarbeiter werden bemüht sein Ihnen am Telefon bei der Behebung des Fehlers behilflich zu sein, oft können Probleme schon durch ein Telefonat behoben werden.

Halten Sie bitte folgende Informationen bereit bevor Sie Ihren Lojer Händler anrufen:

- Ihren Namen, Adresse, Telefonnummer wo wir Sie erreichen können.
- Die Artikelbezeichnung, Artikelnummer und Seriennummer des Gerätes
- Kaufdatum
- Eine Kurzbeschreibung des Fehlers/Problems

9 Kontaktinformation

Hersteller

Lojer Oy

POB 54

Putajantie 42

FIN-38201 Vammala

Tel. +35810 830 6700

Fax. +35810 830 6702

Email: firstname.lastname@lojer.com

<http://www.lojer.com>

Service

Tel. +35810 830 6750

Email: service@lojer.com

Verkauf

Tel. +35810 830 6700

Email: firstname.lastname@lojer.com