



Gebrauchsinformationen Deutsch

Stand 05/2018

Liebe Kundin, lieber Kunde,

wir beglückwünschen Sie zum Kauf der majimo Kissens und Zubehör.

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation vor der ersten Anwendung und Reinigung aufmerksam durch. Vielen Dank.

Bei weiteren Fragen zum Produkt können Sie sich gerne an uns wenden.
Für medizinische Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Ihr Sanitätshaus und/oder den Apotheker Ihres Vertrauens.

Material- und Farbänderungen vorbehalten.

**Wir wünschen Ihnen erholsame Nächte!
Ihr majimo Familienunternehmen.**

majimo

majimo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Beerenhang 2
44797 Bochum | Germany

Telefon: 0049 234 379 80 449

Web: www.majimo.de
Mail: info@majimo.de

majimo – Ruhen wie auf Wolken



Produktbeschreibung

Schmerzhafte Verspannungen können zu Schonhaltungen und daraus resultierenden dauerhaften Fehlstellungen (Kontrakturen) führen. Aus diesem Grund, ist es entscheidend, muskuläre Verspannungen bereits im Ursprung zu behandeln.

Die dreieckigen majimo Kissen sind in vier verschiedenen Größen erhältlich.

majimo Kissen entlasten Nervenbahnen, Sehnen und Muskeln im gesamten Körper.

Ihre ergonomisch und orthopädisch ideale Formgebung in Verbindung mit dem Einsatz modernster, thermoregulierender und funktionaler Materialien, gewährleisten einen unvergleichlichen Schlaf- und Liegekomfort.

Ursprünglich aus der Pflege für die Pflege entwickelt, bieten Majimo Kissen eine ideale Körperanpassung für jedes Lebensalter in jeder Lebenslage.

Indikation

- bei Nacken und Rückenverspannungen (auch in der Schwangerschaft)
- bei Kopf- und Rückenschmerzen, Migräne
- bei schweren Beinen
- bei einschlafenden, schmerzenden Armen
- bei Knie- und Hüftschmerzen, auch nach Operationen
- bei haltungsbedingtem Schnarchen
- bei bestehenden Haltungsschäden (Kontrakturen)
- zur Vorbeugung von Druckgeschwüren (Dekubitus)
- bei Allergien



Kontraindikation / Anwendungsrisiken

Bisher keine bekannt.

Vorsicht

Alle majimo Produkte sind ausschließlich zur äußeren Anwendung bestimmt.

Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

Bitte achten Sie darauf, dass Babys, Kinder und Ihnen Schutzbedürftige die Füllung nicht in den Mund nehmen, noch mit den Verpackungsmaterialien (Plastik) spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.

Hinweise

Da sich die Füllung im Kissen freibewegen kann, können Füllungs-Stauungen entstehen, während die Enden ausdünnen. Einfach aufschütteln und gegebenenfalls mit einer kräftigen Bewegung aufschlagen und schon ist das Material wieder gleichmäßig verteilt.

Die abfallenden Enden können beliebig gezogen werden. Das Kissen sowie die Bezüge und Schutzbezüge werden mit einer reißfestesten, 5-Faden Sicherheitsnaht vernäht, so dass es ein Verlagern einer pflegebedürftigen Person, von bis zu 150kg, standhält.

Bei der Verwendung der majimo Schutzbezüge wird das Kissen aufgrund der noch eingeschlossenen Luft etwas voluminöser. Die Luft kann durch leichtes gegedrückt auf das Kissen, aus der atmungsaktiven Membran entweichen.

Pflegeanleitung

Alle Majimo-Produkte sind einzeln erhältlich. Die verwendeten Materialien sind kochfest und daher ideal für Allergiker geeignet. Die genauen Pflegehinweise können Sie ebenfalls den vernähten Etiketten entnehmen.

majimo Kissen ohne Reißverschluss



majimo Kissen mit Reißverschluss



Um Ihre Waschmaschine und Ihren Trockner vor Verstopfung durch eine versehentliches Austreten der Füllung zu schützen, sollten die Majimos mit Reißverschluss in einem Wäschenetz gewaschen und getrocknet werden..

Bitte nicht in Trockenpressen (Industriewäscherei) geben, um die Unversehrtheit des Reißverschlusses zu erhalten.

majimo Reisekissen



Die Druckknöpfe sind galvanisiert, rost- und nickelfrei.

majimo weiße Überbezüge



majimo Schutzbezüge



Majimo Schutzbezüge haben eine Membran, die wasserdicht und



Gebrauchsinformationen Deutsch

Stand 05/2018

atmungsaktiv ist. Bitte verwenden Sie kein Chlor zur Desinfizierung oder Bleichung.

Achtung:

Bitte beachten Sie die Anweisung zum Desinfizieren der PUMembran und die Reinigungshinweise des Materials.

Erlaubte Desinfektionsmittel und höchste prozentuale Konzentrationszulassung

2-Propanol 35%

1-Propanol 25%

Ethanol 10%

Desinfektion der PU-Membran:

Sprühen Sie das Desinfektionsmittel großflächig auf.

Lassen Sie es nach Herstellerangabe einwirken

Anschließend mit Wasser abwaschen und trocknen lassen.

Die Schutzbezüge lassen sich auch chemothermisch aufbereiten.

Garantie

Die majimo Kissen haben ab dem Kaufdatum eine Garantiezeit von zwei Jahren.

Bei Inanspruchnahme, ist der Lieferschein oder die Rechnung als Nachweis vorzulegen.

Die Garantie umfasst Schadhaflichkeiten oder Änderungen der Materialeigenschaften.

Normale Härte- oder Eigenschaftsänderungen, die keinen Einfluss auf die druckentlastende Eigenschaft haben, werden mit der Garantie

nicht abgedeckt.

Bitte verwenden Sie die majimo Kissen nach Gebrauchsanweisung, um die Garantiegültigkeit beizubehalten.

Für die Waschungen der majimo Kissen ist ein Intervall von sechs Wochen im häuslichen Umfeld angelegt. Dies entspricht im empfohlene Zeitraum einer garantierten Waschfähigkeit von 18 Waschungen.

Bei benötigtem häufigeren Waschungen, empfehlen wir die Verwendung der majimo Schutzbezüge, die Ihre Kissen vor Körperflüssigkeiten und Sekreten schützen, die Waschintervalle minimieren und Einsatzdauer und auch Langlebigkeit Ihrer majimo Kissen erhöhen.

majimo Kissen-Größen in cm

(Seitendiagonale x Längsseite x höchste Stelle)

XSmall (34x47x10+46cm langes Verstellband)

Small (52x74x11)

Medium (72x102x17)

Large (92x130x22)