


# H A I D I G

Kindergarten-, Therapiebedarf & Befestigungslösungen



## Schwebetuch

Maximallast: 200 kg

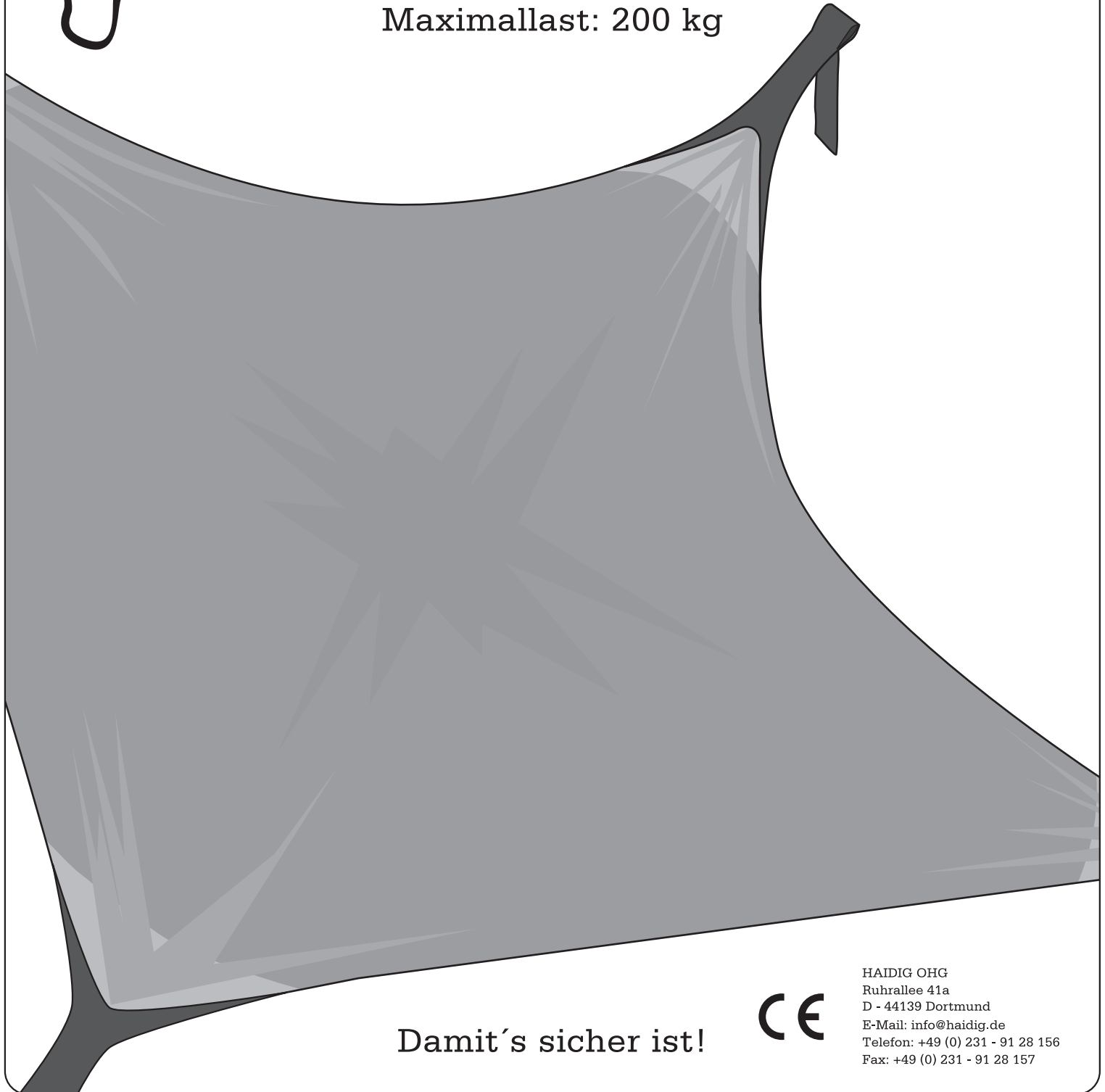

Damit's sicher ist!



H A I D I G O H G  
Ruhrallee 41a  
D - 44139 Dortmund  
E-Mail: [info@haidig.de](mailto:info@haidig.de)  
Telefon: +49 (0) 231 - 91 28 156  
Fax: +49 (0) 231 - 91 28 157

**Sicherheitshinweis:**


Achten Sie unbedingt auf eine fachgerechte Montage. Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit. Verwenden Sie bei der Montage nur Originalteile des Herstellers!

# Schwebetuch

Maximallast: 200 kg



Federsystem  
weich oder hart

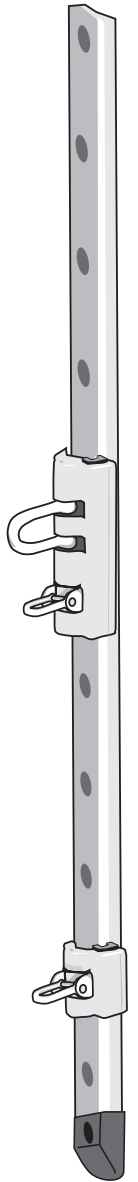

Schwebetuch

Die Befestigungsanweisung  
gilt für alle vier Ecken  
des Schwebetuches!

# HerstellereinFORMATION

## Schwebetuch Artikel-Nummer: 111000

Das Produkt erfüllt die Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

**Sicherheitshinweise: Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar!** In jedem Fall sollte der Patient angemessene Bekleidung (Sportkleidung, Turnschuhe oder Ähnliches) tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Handreifen, Ohrringe, Piercings oder Ähnliche) ablegen.

**Kontraindikationen bei Therapie:** Kontraindikationen, die sich auf das Produkt beziehen, sind derzeit nicht bekannt. Die Verwendung des Produktes gilt als kontraindiziert, wenn nach Meinung des verantwortlichen Fachpersonals (Physiotherapeut/In, Ärztin/Arzt) eine Anwendung des Produktes eine Gefährdung des Patienten hervorrufen würde. Zum Beispiel aufgrund des Allgemeinzustandes des Patienten oder wenn eine körperliche Belastung bzw. die gewählte Methode mit dem mitgelieferten Therapiegerät als solche kontraindiziert ist.

**Maximallast:** 200 kg.

**Material:** Cordura dunkelblau/rot, Polypropylenband.

**Größe:** 250 x 250 cm, 4 Polypropylengurte á 250 cm lang mit Laschen.

**Gewicht:** ca. 4,5 kg ohne Zubehör.

**Sonstiges:** Es werden 4 Federn mit Zugbegrenzungsseilen, 8 Sicherheitskarabiner und 4 Federschutztaschen aus Cordura (4 kompl. Federpakete) mitgeliefert.

**Einsatzmöglichkeiten:** in Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

**Anwendungsmöglichkeiten:** Das Schwebetuch kann an Wand- und/oder Deckenaufhängungssystemen an 2 oder 4 Punkten befestigt werden (empfohlen wird unser HAIDIG-T-Schienensystem). Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

### Beurteilungskriterien:

- Förderung und Verbesserung der gesamten vestibulären Wahrnehmung,
- Förderung der kinästhetischen/propriozeptiven Wahrnehmung (Stellungs-, Kraft- und Bewegungsplanung),
- Förderung der Körperkoordination,
- Förderung der haptischen (taktilen) Wahrnehmung,
- Aufbau des Muskeltonus.

**Pflege und Reinigung:** Cordura ist ein sehr robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich somit leicht ausbürsten, anderenfalls kann das Produkt mit Wasser und einer Seifenlösung gereinigt werden. Eine extreme mechanische Reinigung, die zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen kann, ist zu vermeiden. Desinfektion ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol/Propanol). Bei der Verwendung von anderen Substanzklassen kann es zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials kommen. Keine Lösungsmittel verwenden! Vor dem Zusammenfallen muss das Tuch richtig trocken sein, sonst kommt es zur Stockfleck-Bildung.

**Hinweis zur Wiederverwendbarkeit:** Das Produkt kann bei erhaltener Funktion und unbeschädigtem Material wiederverwendet werden. Vor einer erneuten Anwendung muss sich der Anwender vom ordnungsgemäßen Zustand des Produktes überzeugen. Es dürfen nur Produkte im einwandfreien technischen und hygienischen Zustand erneut angewendet werden.

### Hersteller:

HAIDIG OHG  
Ruhrallee 41a  
44139 Dortmund  
www.haidig.de

Amtsgericht Dortmund  
HRA 16342

