



Tierstein 2
78661 Dietingen
Fon 0711-8879752
0175-4412384
Fax 0711-8568151
info@wenea.de
www.wenea.de

Stand Oktober 2015



Gebrauchsanweisung
beachten



Hersteller



trocken
aufbewahren



Gebrauchsanweisung Therapieraps


Benutzung

Abbildung 1

Raps, der zur Kältebehandlung verwendet werden soll, wird vor der Anwendung in der verschlossenen Wanneneinlage oder dem FlexiSack im Kühlschrank aufbewahrt. Die Wanneneinlage, bzw. der FlexiSack ermöglicht eine einfache und schnelle Handhabung bei der Kühlung des Rapses.

Abbildung 2 und 3

Zur Behandlung wird die Einlage in der Ergonomiewanne ausgebreitet. Dabei soll die Wanne auf einem kipp sicheren Tisch stehen. Die Ergonomiewanne gewährleistet eine bequeme und entspannte Körperhaltung. Nach der Behandlung wird die Wanneneinlage wieder verschlossen. Bei Verwendung des FlexiSack ist ebenso auf einen sicheren Stand zu achten.

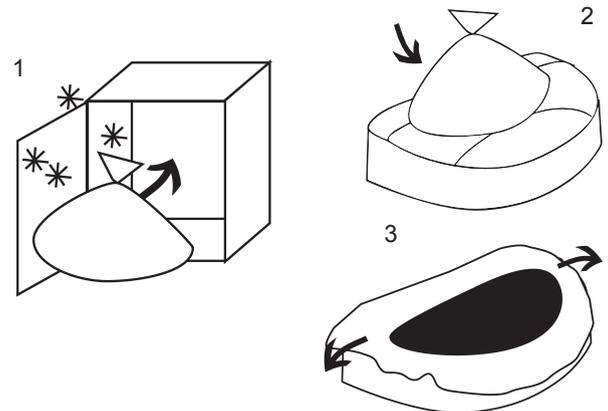

Bitte beachten!

Raps ist ein Naturprodukt. Deswegen kann es anfänglich während der Anwendungen zu schwarzen Verfärbungen an den Händen kommen.

Das ist jedoch völlig unbedenklich und leicht abwaschbar.

Anwendung

Wenea Therapieraps dient zur Behandlung bei akuten oder chronischen Entzündungen, bei Sensibilitäts- und Wahrnehmungsstörungen, zur Mobilisation und taktilen Stimulation der Hand- und Fingergelenke sowie der Unterarme oder der Füße. Bei Anwendung an den Füßen darf der Therapieraps nur für einen Patienten verwendet werden.

Während der Anwendung werden die zu behandelnden Körperteile, z. B. die Hände, in den Therapieraps eingetaucht und aktiv oder passiv bewegt und massiert. Die Behandlung kann zwischen 5 und 20 Minuten dauern.

Wenea Therapieraps wird nach Bedarf gekühlt oder bei Raumtemperatur angewandt (**nicht kälter als Kühlschrantemperatur**).

Alle Körperteile, die behandelt werden sollen, vor Gebrauch des Rapses waschen und desinfizieren, um eine vorzeitige Verschmutzung der Rapskörner zu verhindern.

Nach der Anwendung die mit Therapieraps in Berührung gekommenen Hautstellen säubern, besonders Fingerzwischenräume und Fingernägel und erneut desinfizieren.

Lagerbedingungen:

Den Therapieraps kühl, trocken und vor Verschmutzung und Ungeziefer geschützt lagern, jedoch nicht luftdicht. Therapieraps nicht im Gefrierfach lagern.

Was ist zu beachten ?

An Hautverletzungen, Wunden, Schürfungen oder Allergien nicht einsetzen. Bei Infektionskrankheiten bzw. ansteckenden Erkrankungen nicht verwenden.

Bei der Anwendung in hygienisch sensiblen Bereichen, wie z.B. in der Umgebung von multiresistenten Keimen und auf Stationen in Akutkliniken, darf der Therapieraps nur für einen Patienten verwendet werden.

Nur zur äußeren Anwendung. Bei stark gekühltem Raps besteht bei Benutzern mit Sensibilitätsstörungen die Gefahr der Unterkühlung. Kinder nur unter Aufsicht behandeln. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Vorsicht! Auf herabgefallenen Rapskörnern besteht erhebliche Rutschgefahr. Heruntergefallene Körner unverzüglich beseitigen ohne daraufzutreten. Sollte keine Wenea Ergonomiewanne verwendet werden, ist unbedingt auf einen sicheren Stand des verwendeten Gefäßes zu achten.

Mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten nicht in Berührung bringen. Sollte der Therapieraps verschmutzen, schimmeln oder keimen, z.B. durch falsche Lagerung, kann er nicht mehr verwendet werden.

Den Therapieraps nach ca. 6 Monaten austauschen. Bei häufigem Gebrauch durch verschiedene Personen entsprechend früher. Der Raps kann z. B. in der Bioabfalltonne entsorgt werden.

Höchstens haltbar bis 9 Monate nach Abfülldatum. Siehe Aufdruck

Max. Lagertemperatur 25° C / Max. Luftfeuchtigkeit 70 %